

**«ПОГОДЖЕНО»**

Перший заступник голови Державної  
служби України з лікарських засобів

29 грудня 2012 р.

**І.Б. Демченко**

**«ЗАТВЕРДЖУЮ»**

Головний лікар клінічної лікарні „Феофанія”  
Державного управління справами

20 грудня 2012 р.

**І.П. Семенів**

REF НК010.03

ТУ У 24.4-24607793-22:2008

**ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ НАБОРУ КАЛІБРУВАЛЬНИХ РОЗЧИНІВ  
БІЛКА**



**ПРИЗНАЧЕННЯ**

Калібрувальні розчини призначені для побудови каліброваного графіка при визначенні концентрації білка набором «Загальний білок» (FD), у клініко-діагностичних і біохімічних лабораторіях, використання їх у науково-дослідницькій практиці.

Діапазон калібрувальних концентрацій - від 15 г/л до 110 г/л.

Коефіцієнт варіації концентрації - не більше 5%.

Зберігання набору - при температурі від плюс 2 °С до плюс 8 °С.

Гарантійний термін придатності набору - 12 місяців від дня виготовлення.

Набір призначений для застосування *in vitro* професійно навченим лаборантом.

**СКЛАД НАБОРУ**

1. **Калібрувальні розчини білка** - 5 флаконів по (2,0 ± 0,1) мл  
(розчини з концентрацією альбуміну **А, Б, В, Г, Д** г/л)  
(точне значення концентрації альбуміну зазначено на флаконах з калібрувальними розчинами)

**ОБЛАДНАННЯ**

1. Піпетки місткістю 1, 2, 10 мл (ГОСТ 29227-91).

**ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ**

1. **Калібрувальні розчини білка.** Готові до застосування. Розчини стабільні при зберіганні в темному місці. Після розкриття розчин стійкий близько 7 діб при температурі від плюс 2 °С до плюс 8 °С.

**УТИЛІЗУВАННЯ**

Всі зразки для аналізу вважають за матеріал, який може бути інфікований, і спільно з можливими залишками реактивів підлягає знищенню відповідно до затверджених внутрішньолікарняних правил.

Паперову упаковку здайте в макулатуру, виполоскану тару - в сортоване сміття.

**ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ**

1. При роботі використовувати гумові рукавички, заборонено їсти, пити, курити.  
2. Калібрувальні розчини включають азид натрію (отруйна речовина).



CP 7620/2008  
29.12.2012



**ТОВ НВП «Філісіт-Діагностика»**,  
Україна, 49051 Дніпропетровськ, вул. Каштанова, 32  
Тел./факс: (056) 747-47-76, 747-45-34  
Тел.: (093) 573-75-35, (067) 535-15-73, (095) 168-36-54  
E-mail: felicit\_d@ua.fm <http://www.felicit.com.ua>