

«ПОГОДЖЕНО»

Перший заступник голови Державної
служби України з лікарських засобів
09 листопада 2012 р. **І.Б. Демченко**
REF № НР009.04

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Головний лікар клінічної лікарні „Феофанія”
Державного управління справами
30 жовтня 2012 р. **І.П. Семенів**
ТУ У 24.4-24607793-020-2003

**ІНСТРУКЦІЯ ДО НАБОРУ РЕАКТИВІВ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ
БУФЕРНОГО РОЗЧИНУ НА ЕКСАН ДЛЯ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ
ГЛЮКОЗИ У БІОЛОГІЧНИХ РІДИНАХ IVD**

ПРИЗНАЧЕННЯ

Набір призначений для приготування буферного розчину до аналізаторів ЕКСАН для визначення глюкози у цільній крові, сироватці крові, плазмі та сечі людини в клініко-діагностичних та біохімічних лабораторіях, науково-дослідницькій практиці.

Набір розрахований на сумарний об'єм робочого розчину **1000 мл**.

Зберігання набору - при температурі від плюс 2 °С до плюс 16 °С.

Гарантійний термін придатності набору - 12 місяців від дня виготовлення.

Набір призначений для застосування *in vitro* професійно навченим лаборантом.

СКЛАД НАБОРУ

- 1 Фосфатний буфер (рН розчину **7,2 - 7,4**) - 1 флакон з (12,0 ± 0,6) г або
- Na₂HPO₄ (24 ± 5) ммоль, КН₂РО₄ (6 ± 2)ммоль, 1 флакон з (50 ± 2) мл
- КСІ(100 ± 5) ммоль, трилон Б (1,0 ± 0,1) ммоль.

ОБЛАДНАННЯ

Колба мірна місткістю 1000 мл (ГОСТ 1770).

ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ

Вміст флакону кількісно переносять в мірну колбу на 1000 мл, наливають дистильовану воду, розчиняють, потім доводять дистильованою водою до мітки, перемішують і, при необхідності, фільтрують. рН готового розчину (**7,2-7,4**). Далі використовують згідно з інструкцією до аналізаторів ЕКСАН. Розчин використати протягом тижня.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

Для контролю ходу реакції і процедури вимірювання рекомендується використовувати контрольні сироватки. Наприклад: «Ліонорм» (Чехія), „ФілоНорм” або „ФілоПат” (Україна).

Кожна лабораторія повинна встановити власну внутрішню систему контролю якості.

ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ

1. При роботі використовувати гумові рукавички, заборонено їсти, пити, курити.

УТИЛІЗУВАННЯ

Всі зразки для аналізу вважають за матеріал, який може бути інфікований, і спільно з можливими залишками реактивів підлягає знищенню відповідно до затверджених внутрішньолікарняних правил.

Паперову упаковку здайте в макулатуру, виполоскану тару - в сортоване сміття.



CP 2219/2003
09.11.2012



ТОВ НВП «Філісіт-Діагностика»,
Україна, 49051 Дніпропетровськ, вул. Каштанова, 32
Тел./факс: (056) 747-47-76, 747-45-34
Тел.: (093) 573-75-35, (067) 535-15-73, (095) 168-36-54
E-mail: felicit_d@ua.fm <http://www.felicity.com.ua>